

دستور العمل محاسبه ادرار 24 ساعته

- ابتدا ادرار را با آب مقطر به نسبت 1 به 10 رقیق نموده و به دستگاه بیوشیمی می دهیم تا خوانش را انجام دهد. سپس عدد به دست آمده از دستگاه را در فرمول مربوطه قرار می دهیم.

$$y' = 10 \times \text{دستگاه}$$

(1)اوره

Normal range:

26-43

حجم $\times y$

100 $\times$ 1000

Creatinine(2)

Normal range:

26-14 : خانم

20-11 : آقا

حجم $\times y$

100 $\times$ $\left\{ \begin{array}{l} 60 \text{ (خانم)} \\ 70 \text{ (آقا)} \end{array} \right.$

ca , uric acid (3)

Normal range ca:

50-300

Normal range u.a:

250-750

حجم $\times y$

100 $\times$ 1000

- برای محاسبه پروتئین در ادرار 24 ساعته، لایه رویی نمونه سانتریفیوژ شده را بدون رقیق سازی به دستگاه بیوشیمی می دهیم و عدد حاصله را در فرمول زیر قرار می دهیم:

Normal range :

کمتر از 150

حجم $\times$ پروتئین خوانده شده

100